



Zibo Athene


...gør en forskel



Tekniske data

6 kg | 83x200 cm
HMI nr.: 37220
Varenr.: 12000020

6 kg | 88x200 cm
HMI nr.: 87022
Varenr.: 12000024

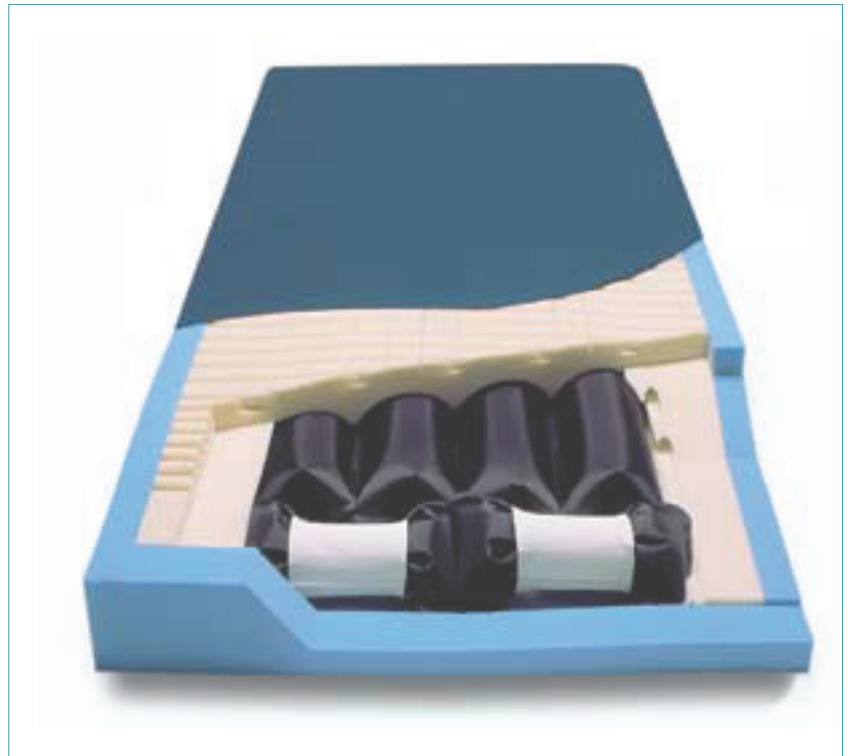

Trykvogteren

Pumpeløs og selvjusterende anti-tryksårsmadrass

Trykvogteren er baseret på det patenterede CFT-system, som består af et netværk af forbundne cylindre og elastiske kamre. Kamrene indstiller sig automatisk på det optimale terapeutiske niveau for den enkelte patient, uanset vægt eller kropstilling. Trykvogteren er pumpeløs og tilbyder et statisk underlag til patienter, som ikke tåler vekseltryk. Den bruges ved behandling af sårkategori 1,2,3 og 4.

4 længdegående luftceller

Systemet består af 4 længdegående luftceller, som er forbundet med hinanden. Luftcellerne arbejder uafhængigt af hinanden – i samarbejde med overfladen. Når luftmængden ændres i ét kammer, f.eks. ved vending fra rygleje til sideleje, presses luften videre til de øvrige kamre.

Nedsæt shear

De 4 luftceller er bygget ind i en skumramme med en overflade af patenteret skum, Geomatt. Materialet er udviklet for at nedsætte shear og har desuden en klinisk dokumenteret trykaflastende effekt.

Brugervenligt design

Skumrammens faste yderkant sikrer, at patienten ligger centralt på madrassen. Det gør desuden ind- og udstigningen mere stabil og letter vending/forflytning. Det ydre inkontinensbetræk er åndbart og har lynlås på tre sider.

Egenskaber

- Madrassen indstiller sig automatisk på det optimale terapeutiske niveau for den enkelte patient uden strøm.
- Indbygget hælaflastning.
- Inkontinensbetræk, som er bakteriestatisk og anti-statisk behandlet.
- Madrassen er brandhæmmende.

Brugervægt 0-227 kg

Madrassvægt 10,5 kg

Sammensætning 4 luftceller

Materiale
Betræk: PU
Celler: PU
Bundstykke: PU

Rengøring Madrassen rengøres med sæbevand og desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 40 grader.

Garanti 5 års garanti mod fabrikationsfejl i materialer og konstruktion.



Trykvogteren

Brugervejledning

Montering

Madrassen placeres i sengen med den grønne side opad, den grå side nedad. "Foot end" står på siden af madrassen på den ende som skal placeres i fodenden af sengen.

Før ibrugtagning af fabriksny madras

Madrassen er fra fabrikken max fyldt med luft og skal justeres. Dette gøres ved at anvende den vedlagte lille autojusteringsventil. Indsæt den hvide ende af ventilen i det første hul indtil der lyder et lille klik. Der sidder to huller skjult under dækkklædet og velcroflappen på siden i nederste ende af madrassen, indtil der lyder et lille klik. Overskydende luft ledes ud og herved udlignes evt. overtryk og madrassen er klar til brug. Fjern ventilen når der ikke kommer mere luft ud. Gentag processen ved det andet hul. Madrassen vil her efter automatisk tilpasse sig brugerens kroppsfacon og vægt.

Servicering og justering af luft og tryk

Dette bør gøres ca. 2 gange årligt på et tidspunkt, hvor brugeren ikke ligger på madrassen. Brug servicekit bestående af en pumpe og 2 stk. studs (den ene mærket IN den anden mærket OUT), (hvis der ligger en 3. studs med en sort spids, kan den blot kastes bort idet den ikke bruges til Trykvogteren)

1. Forbered pumpen

Dvs. sæt den grå studs, der brækkes af ved håndtaget, på spidsen af pumpen. (Lad den blot blive siddende fremover, så er den altid klar til brug)

2. Fyld luft ind

Løft flappen, som sidder på siden ved fodenden af madrassen. Der er 2 porte bagved et dækkklæde, som kommer til syne når flappen løftes. Sæt IN-studsens i den ene port (click on system) og fyld min. 4 pumpe tryk i og tag IN-studsens ud. Sæt IN-studsens i den 2. port og gør det samme.

3. Auto-Justér

Sæt OUT studsens i den første port (click on) nu siver der lidt luft ud og udsivningen standser, når trykket er tilpasset. Sæt OUT-studsens i den anden port og gør det samme. Nu er trykket og luftfyldningen automatisk korrekt indstillet. *Noter tidspunkt for senest udførte service og næste dato for service.*

NB: Ved en undervægtig bruger, som ønsker mere komfort, kan lufttrykket justeres ved at sætte OUT-ventilen i både den ene og den anden kanal. Husk at genjustere trykket ved næste bruger.

Opbevaring

Madrassen må ikke foldes eller bøjes under opbevaring. Opbevares tørt og i stuetemperatur. Undgå direkte sollys.

Genanvendelighed og bortskaffelse

Madrassen er fuldt genanvendelig og har lang levetid. Ved bortskaffelse kan madrassen destrueres som brændbart affald. Madrassen skal ikke skilles ad.

Rengøring

Rutinerengøring

Vask af med lunken sæbevand. Skyl, tør efter og lufttør.

Vanskelige pletter

Brug en blød svamp med rengøringsmiddel. Husk altid at bruge midler i den rigtige koncentration som anbefalet af leverandøren. Brug ikke stærke rengøringsmidler eller opløsninger.

Desinfektion

Anvend f.eks. Rodalonopløsning til desinfektion. Følg producentens anvisninger om koncentration vedrørende rengøring. Jod og brom vil misfarve betrækket. Kontamination med blod på betrækket kan desinficeres med 1:10 klor opløsning. Brug af forkerte opløsninger kan resultere i misfarvning og betrækket kan blive væskegennemtrængeligt.

Clostridium Difficile

Er der risiko for forurening med Clostridium Difficile (spore-dannende bakterier) anbefales rengøring med hypoklorid-baserede desinfektionsmidler.

Desinfektion af madras

Ved behov for desinfektion af madrasbetræk, som følge af forurening med kropsvæsker, undersøges betræk og lynlås for tegn på brud, huller eller slid. Hermed sikres, at der ikke er væskegennemtrængning. Er der tegn på kontaminering, sættes madrassen i karantæne og de lokale procedurer for desinfektion og infektionskontrol følges.

Betræk

Sørg for at betræk er lufttørret mindst 20-30 minutter før brug. Betrækket tåler vask ved max 40 grader og tørretumling ved lav/kold temperatur. Undgå maskinvask ved høje temperaturer, da betrækket risikerer at blive væskegennemtrængeligt.

OBS: Der kan leveres ekstra betræk.