



Tag madrassen ud af tasken.



Åben spændet der holder madrassen og rul madrassen ud på sengen.
OBS! Fodende er tydelig markeret på madrassen.



Tag pumpen.



Sæt pumpen fast på sengegavnlén i fodenden med de 2 kroge.
OBS! Skub krogene sammen, så pumpen sidder tæt på sengegavnlén.



Sæt slangen fra madrassen i pumpen. Den kan kun sættes i på en måde.



Sæt ledningen ind i ledningsophæng langs siden af madrassen, så den ikke kommer i klemme eller ligger på gulvet. Sæt ledning i kontakt og tænd strømmen.



Fastgør madrassen til den bevægelige del af sengerammen. Der er 3 bændler på hver side.



Se at CPR ventilen er lukket. Pilen skal være på CLOSE. Ved **hjerrestop** eller når madrassen skal tømmes, skal pilen drejes til OPEN. (Når man står ved fodenden er CPR ventilen på venstre side af madrassen på den øverste del)



Tænd pumpen på siden.



Tænd herefter pumpen på fronten og madrassen fyldes op. **Når madrassen er fyldt indstiller pumpen automatisk trykket og starter på alternate (vekseltryk).** Først herefter kan den ønskede terapi indstilles. (Se vejledningen "indstillinger")