



Zibo Athene

...gør en forskel



BRUGERVEJLEDNING CIRRUS DYNAMISK HELMADRAS

TIL FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF TRYKSÅR T.O.M.
STADIE 4

Installation og start

1. Læg madrassen på sengebunden.
2. Hæng pumpen på ende gavlen, (fodenden), ved hjælp af to ophæng, eller stil pumpen på et fast underlag ved siden af sengen.
3. Klik slangerne fra madrassen fast på pumpen. Når der høres et "klik", er slangerne koblet korrekt på pumpen
4. Sæt stikket i og tænd for pumpen. Der skal tændes både på siden og på frontpanelet.
5. Pumpen fylder madrassen. Autofirm lyser til madrassen er fyldt.
6. Indstil pumpen i følgende rækkefølge:
 - a. **Therapy** indstilles til alternate (dynamisk)
 - b. **Comfort** indstilles efter brugerens vægt brug piletasterne til den ønskede indstilling er nået, vejledende vægtskema hænger på pumpen.
 - c. **Cykle time** indstilles, 10 er mest brugt.
7. Når madrassen er helt fyldt, vil pumpen starte på de indstillede Funktioner, og Autofirm slukker.
8. Ønsker man at "låse" pumpen for at undgå uønskede ændringer, tryk da på PANEL LOCK i 2 sek. og der tænder et grønt lys. For at låse op igen trykkes igen i 2 sek. Til det grønne lys Slukker. Der kan låses når Autofirm slukker.

1. Tryk/komfort

Indstil efter brugerens vægt og ønskede komfort. Brug vægtskala som rettesnor. Lav altid Håndtest

2. Cyklus tid

Indstil på den ønskede tid.

3. Terapiform

Indstil den ønskede terapi ved at trykke på knappen til der er lys ved det ønskede.

- **AUTOFIRM**,

bruges ved pleje/vende. Madrassen bliver hel fast/hård så det er lettere at arbejde. Denne funktion holder i 20 min., så vender den tilbage til alternerende. (sidste indstilling)

- **ALTERNATE**, vekseltrykfunktion

- **STATISK**, stille stående/statisk funktion.

Den kan holde i 20 min. så vender den tilbage til alternerende.

- **SEAT INFLATION**, sidde funktion.

Hvis brugeren har behov for mere stabilitet i den siddende stilling. Hele madrassen bliver lidt fastere. Kan vælges med alternerende eller statisk funktion.

4. Kontrolpanel.

Hvis der ikke har været ændret på kontrol panelet i 3 min. låses automatisk. For at låse op trykkes på knappen i 10 sec. til lyset ved knappen slukker.

5. Alarm.

Hvis der opstår en fejl kan det høres og ses. Lyden kan slås fra ved at trykke på alarm mute. Hvis fejlen ikke rettes i løbet af 3 – 5 min. kommer lyden igen.