



Zibo Athene

...gør en forskel

Cirrus madrassen Fejlfinding

Lavt tryk

Hvis der er et gult lys ved dette symbol og der lyder en alarm, så er trykket for lavt i madrassen

Tjek følgende

- Er CPR ventilerne i madrassen lukkede, ellers lukkes de. (CPR sidder i hovedenden)
- Er slangerne korrekt koblet på pumpen. Der skal lyde et lille klik.
- Er en af cellerne i madrassen gået af luftslangerne, så kobles den på igen.

Strømsvigt

Hvis der er et gult lys ved dette symbol og der lyder en alarm, så er der slukket for strømmen.

Tjek følgende

- Er det korrekt at strømmen slukkes, så tryk på ALARM MUTE og tag stikket ud.
- Er det en fejl, så tænd for strømmen og tryk på POWER, så starter pumpen igen, og den husker sidste indstilling.

Service

Hvis den lyser og alarm lyder tjek følgende:

Er filtret stoppet – renses, tørres og sættes i igen.

Ring til forhandleren hvis filtret ikke er ok.