



**Zibo Athene**

...gør en forskel



### Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

**36x41x6x6 cm**  
HMI nr.: 38788  
Varenr.: SP1416

**46x46x6x6 cm**  
HMI nr.: 31344  
Varenr.: SP1818

**41x41x6x6 cm**  
HMI nr.: 31341  
Varenr.: SP1616

**46x51x6x6 cm**  
HMI nr.: 31345  
Varenr.: SP1820

**41x46x6x6 cm**  
HMI nr.: 31342  
Varenr.: SP1618

**51x46x6x6 cm**  
HMI nr.: 101002  
Varenr.: SP2018

**46x41x6x6 cm**  
HMI nr.: 31343  
Varenr.: SP1816

**51x51x6x6 cm**  
HMI nr.: 31346  
Varenr.: SP2020

## Stimulite® Sport pude

Lav og flad siddepude til den aktive bruger

Puden anvendes til at forebygge tryksår hos brugere i lav- og medium risikogruppen.

### Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed. Det underste lag er stødabsorberende, til den aktive bruger eller brugeren der dyrker kørestolsport.

### Perfekt siddestilling

Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

### Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

**Brugervægt** Max 100 kg

**Vægt** 1,6 kg