



Zibo Athene

...gør en forskel



Brugsanvisning

SAM

statisk topmadras med vedligeholdelsespumpe

Til forebyggelse og behandling af tryksår t.o.m. stadie 2.

Installation og opstart.

1. Hæng pumpen på sengegavlen eller stil pumpen på et lige og fast underlag ved fodenden af sengen (Den lyseblå vedligeholdelse/fyldepumpe)
2. Placer madrassen oven på standardmadrassen eller en anden skummadrass. Vær opmærksom på fodenden Fastgør madrassen med de 4 elastikbånd i hjørnerne
3. Sæt slangerne fra madrassen på pumpen
4. Sæt elstik i kontakten og tænd. Start ved at trykke på den grønne knap på siden af pumpen (den skal lyse)
5. Stil på komfort på den vægt brugeren har. Indstillet tryk opnås efter ca. 15 min. Vægtskala er fastgjort på pumpen
6. Brugeren kan nu lægge sig på madrassen, og madrassen indstiller sig langsomt
7. Kontroller ved håndtesten at det indstillede tryk passer til borgeren

Tømning af madrassen

1. Tag slangerne af pumpen og lad dem sidde på madrassen, så siver luften ud. Der er kontra ventiler i slangerne, så luften kommer først ud når ventilerne åbnes vha. slangernes studs